



Средство многофункциональное отоларингологическое для промывания ушного прохода А-Церумен (A-CERUMEN), спрей в пластиковом флаконе.

Инструкция по применению

Состав на 100 г

Действующие вещества:
Поверхностно-активные вещества 43,06 г
Вспомогательные вещества: до 100 г

Форма выпуска

Спрей 40 мл в пластиковом флаконе с распылительной насадкой. Флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Свойства

Способствует растворению ушной серы и облегчает ее удаление из ушной раковины.

Предназначение

- Регулярная гигиена ушей.
- Растворение серных пробок.
- Профилактика образования серных пробок.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам.
- Отиты, перфорация барабанной перепонки, наличие трубки для вентиляции среднего уха.
- Дети до 2,5 лет.

Способ применения

Произвести по одному впрыскиванию в каждое ухо.
Оставить на 1 минуту. Наклонить голову набок, чтобы из уха вытекла растворенная сера. Промыть физиологическим раствором или водой. Вытереть отделяемое из уха ватным тампоном.
При наличии серных пробок: применять утром и вечером в течение 3-4 дней.
Для регулярной гигиены ушей: применять 2 раза в неделю.

Особые указания

Во избежание раздражения не рекомендуется вставлять наконечник спрея в ушной проход глубоко.
При болезненности слухового прохода, проконсультируйтесь с врачом.
Избегать попадания в глаза. Не глотать.

Срок годности

3 года.
Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 30° С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Laboratoires
GILBERT

Производитель:

Лаборатории ЖИЛЬБЕР, Франция
928, Авеню Генерала де Голля
14200, ЭРУВИЛЬ СЕН-КЛЭР

BIOCODEX

Претензии потребителей направлять по адресу:

ООО «БИОКОДЕКС»
107145, Москва, Последний переулок, д.11, стр.1.
Тел.: (495) 783 26 80
Факс: (495) 783 26 81

Рег. уд. № ФСЗ 2011/10222 от 19.07.2011 г.





Date : 02/04/2015

Produit : Notice A-CERUMEN SPRAY Russie

Référence : IG : 246141 - NR 03/15

Couleur : 021, 653

Format à plat : 90 x 170 mm

Format plié :

Quantité : 22 000